

# シービーワン CP-One

## OPERATING GUIDE

### ご使用前に…



①まずアシスタント部の下部にある、水の元バルブをOPENにします。

●元バルブ



②テーブル下部にあるメインスイッチのレバーを上げます。

●メインスイッチ

これで使用する準備はできました。

### ドクターテーブルの操作

チェアマニュアル操作 ●

デンタルビューア ●  
オートリターン ●  
うがいポジション ●

4 ④ LP ③ 0 ●  
1 ① 2 ② ●

●元バルブ ●

●タイマー ●  
●デンタルライト ●  
●コップ給水 ●  
●ストアスイッチ ●  
●各種機能設定 (ファンクション) ●

●プリセット ●

●ハンドピーススプレー ●  
(水のみ「緑色」、エアのみ「橙色」 スプレー時は両方点灯)

●ハンドピーススライド ●  
●マイクロモーター正逆切替 ●  
正転時「緑色」 逆転時「橙色」

※詳細は取扱説明書をご覧ください。

### チェア位置の設定方法

1. 設定したいプリセットスイッチ(①②)を押してチェアを移動させます。
2. マニュアル操作でチェアを希望の位置に移動させストアスイッチを押し、再び1.で押したスイッチを押し、ストアスイッチを押せば設定完了です。



●ストアスイッチ

●水フラッシュアウト用水量調整 ●

●シリンジ ●  
水量調整(青)  
エア調整(黄)

●ハンドピーススプレー用 ●  
エア調整

●ハンドピース ●  
水量調整

### アシスタント機能

●デンタルライト ●  
●コップ給水 ●  
●鉢洗い ●  
●うがいポジション ●  
●オートリターン ●

●プリセット ●

●温水器スイッチ ●  
1…ON  
0…OFF

●デンタルライト ●  
●操作切り替え ●  
スイッチ ●

●シリンジ ●  
●エア調整(黄) ●  
●水量調整(青) ●

●エアークラパー ●  
●水クラパー ●

●サービスクラパー ●  
●水量調整 ●

# メンテナンス

## スピットンの清掃




排水キャップ

排水フィルター

排水キャップ、排水フィルターを取り外し、中性洗剤を浸したスポンジ等で汚れを落としてください。  
注) 酸やアルカリ性の洗浄剤を使用すると、金属などを腐食させるおそれがありますので使用しないでください。またボウル着脱の際には、必ず事前にメインスイッチをお切りください。

## バキュームハンドピースの清掃

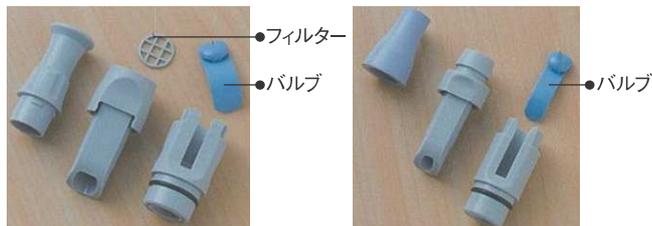

●フィルター

●バルブ

●バルブ

写真のように本体を分解し、溜まったゴミの洗浄を行ってください。バルブ以外はオートクレーブ滅菌が可能です。

## バキューム排唾ラインの洗浄



タカラベルモントのユニット専用洗浄液オロトルプラスを使用し、バキュームHPと排唾管を挿し込み吸引させます。

※詳しくはオロトルプラスの説明書をご覧ください。

## ソリッドコレクターの清掃



●ソリッドコレクター



ソリッドコレクターを取り外す時に水がこぼれないように雑巾等で受けてください。

## ハンドピースの清掃



カプリングからタービン本体を外し、上図のように専用のスプレーオイルで注油します。

※詳しくはお使いのハンドピース説明書をご覧ください。

## オイルミストセパレーターの清掃




ハンドピース内に含まれるオイルがこの容器内のスポンジに溜まりますので、1ヶ月に1回は洗浄してください。

●オイルミストセパレーター

※容器を時計回りに回すとゆるみます。

## チェアレザーの清掃

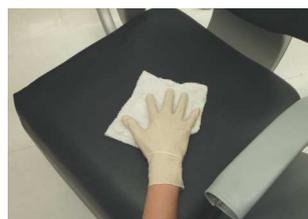

当社推奨のデュール製除菌・洗浄液を使用し、レザー表面を柔らかい布で清掃してください。

注) 溶剤や研磨剤、シンナーを含んだ洗剤は使用しないでください。

### 修理を依頼される前に

下記をご確認ください。

ユニット、  
チェアが  
作動しない

- ① ユニットのメインスイッチやチェアの電源スイッチは入っていますか。
- ② エアの圧力計表示※は正常ですか。
- ③ コンプレッサーは正常に作動していますか。
- ④ ユニット用電源ブレーカーは入っていますか。

※(水0.09~0.19MPa/エア-0.44~0.49MPa)

バキュームが  
吸引しない

- ① バキュームモーターは正常に作動していますか。
- ② バキュームハンドピースのバルブは開いていますか。
- ③ バキュームハンドピースやソリッドコレクターのフィルターがごみ詰まりしていませんか。

## タカラベルモント株式会社

東京 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 ☎(03)3405-6877 代表  
大阪 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 ☎(06)6212-3602 代表

●札幌 (011) 863-2007 ●東京 (03) 3405-6877 ●徳島 (088) 652-1701  
●盛岡 (019) 652-9744 ●横浜 (045) 681-6241 ●岡山 (086) 233-8825  
●仙台 (022) 232-4480 ●名古屋 (052) 932-6251 ●広島 (082) 278-2411  
●郡山 (024) 925-0742 ●金沢 (076) 221-8412 ●福岡 (092) 411-2746  
●新潟 (025) 268-0333 ●京都 (075) 241-3425 ●鹿児島 (099) 226-9481  
●さいたま (048) 640-5900 ●大阪 (06) 6212-3602  
●千葉 (043) 302-0267 ●神戸 (078) 231-6751

ベルモントコミュニケーションズ(株) コールセンター(0120)194-222(ダイヤル) FAX(072)344-7985  
[ホームページアドレス] <http://www.takara-dental.jp>