

NX compact

ネクステージコンパクト

OPERATING GUIDE

ご使用の前に



- ①チェア電源スイッチ (緑色)をONにします。
- ②アシスタント部の下部にある水の元バルブをOPENにします。

- ①チェア電源スイッチ
- ②元バルブ



- ③テーブル下部にあるメインスイッチを入れてください。

- メインスイッチ

これで使用する準備はできました。

ドクターテーブルの操作

- ストアスイッチ
- 各種機能設定(ファンクション)
- ハンドピースライト
- ハンドピーススプレー (水のみ「緑色」・エア-のみ「橙色」。スプレー時は両方点灯)
- マイクロモーター 回転数上限調整
- マイクロモーター 正逆切替え (正転時「緑色」、逆転時「橙色」)
- 数値設定スイッチ
- うがいポジション
- オートリターン
- チェアマニュアル操作
- コップ給水
- 鉢洗い
- デンタルライト
- プリセット

※詳細は取扱説明書をご覧ください。

テーブル底面




- ハンドピース 水量調整(青)
- シリンジ 水量調整(青)・エア-調整(黄)

チェア-の設定方法

1. マニュアル操作でチェア-を希望の位置に移動させます。
2. 設定したいプリセットスイッチ(①か②)を5秒ほど押し続け、ブザーが鳴ったらセット完了です。

センサー式デンタルライト

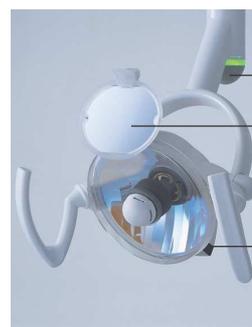


- 照度切替スイッチ HIGH設定時(緑色) LOW設定時(橙色)
- 患者用ミラー
- センサー 手を近づけると点灯/消灯します。手を2秒ほどかざし続けるとレンジンモードに切り替わります。

アシスタント機能

- デンタルライト
- コップ給水
- うがいポジション
- 鉢洗い
- オートリターン
- プリセット

- 温水器スイッチ I...ON O...OFF
- エア-カブラー
- シリンジ 水量調整(青) エア-調整(黄)
- 鉢洗い 水量調整

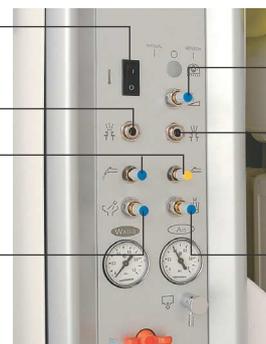

- 水カブラー 水量調整
- 水カブラー
- コップ給水 水量調整

メンテナンス


スピットンの清掃



排水キャップ、排水フィルターを取り外し、中性洗剤を浸したスポンジ等で汚れを落としてください。

注) 酸やアルカリ性の洗浄剤を使用すると、金属などを腐食させるおそれがありますので使用しないでください。またボウル着脱の際には、必ず事前にメインスイッチをお切りください。

バキュームハンドピースの清掃

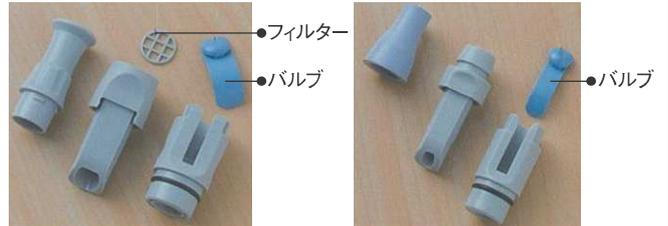

写真のように本体を分解し、溜まったゴミの洗浄を行ってください。バルブ以外はオートクレーブ滅菌が可能です。

ソリッドコレクターの清掃



ソリッドコレクター ●



ソリッドコレクターを取り外す時に水がこぼれないように雑巾等で受けてください。

ハンドピースの清掃



カプリングからタービン本体を外し、専用のスプレーオイルで注油します。

※詳しくはお使いのハンドピース説明書をご覧ください。

バキューム排唾ラインの洗浄



タカラベルモントのユニット専用洗浄液オロトルプラスを使用し、バキュームHPと排唾管を挿し込み吸引させます。

※詳しくはオロトルプラスの説明書をご覧ください。

オイルミストセパレーター



ハンドピース内に含まれるオイルがこの容器内のスポンジに溜まりますので、1ヶ月に1回は洗浄してください。

●オイルミストセパレーター
※容器を時計回りに回すとゆるみます。

チェアレザーの清掃



当社推奨のデュール製除菌・洗浄液を使用し、レザー表面を柔らかい布で清掃してください。

注) 溶剤や研磨剤、シンナーを含んだ洗剤は使用しないでください。

修理を依頼される前に

下記をご確認ください。

ユニット、
チェアが
作動しない

- ① ユニットのメインスイッチやチェアの電源スイッチは入っていますか。
- ② エアの圧力計表示※は正常ですか。
- ③ コンプレッサーは正常に作動していますか。
- ④ ユニット用電源ブレーカーは入っていますか。

※(水0.09~0.19MPa/エア-0.44~0.49MPa)

バキュームが
吸引しない

- ① バキュームモーターは正常に作動していますか。
- ② バキュームハンドピースのバルブは開いていますか。
- ③ バキュームハンドピースやソリッドコレクターのフィルターがごみ詰まりしていませんか。

タカラベルモント株式会社

東京 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 ☎(03)3405-6877 代表
大阪 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 ☎(06)6212-3602 代表

- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| ●札幌 (011) 863-2007 | ●東京 (03) 3405-6877 | ●徳島 (088) 652-1701 |
| ●盛岡 (019) 652-9744 | ●横浜 (045) 681-6241 | ●岡山 (086) 233-8825 |
| ●仙台 (022) 232-4480 | ●名古屋 (052) 932-6251 | ●広島 (082) 278-2411 |
| ●郡山 (024) 925-0742 | ●金沢 (076) 221-8412 | ●福岡 (092) 411-2746 |
| ●新潟 (025) 268-0333 | ●京都 (075) 241-3425 | ●鹿児島 (099) 226-9481 |
| ●さいたま (048) 640-5900 | ●大阪 (06) 6212-3602 | |
| ●千葉 (043) 302-0267 | ●神戸 (078) 231-6751 | |

ベルモントコミュニケーションズ(株) コールセンター(0120)194-222(ダイヤル) FAX(072)344-7985
[ホームページアドレス] <http://www.takara-dental.jp>