


ご使用前に...

①水の元バルブをOPENにします。

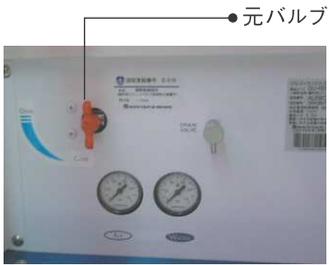

②テーブル右側面にあるメインスイッチをONにします。





③チェア電源スイッチ(緑色)をONにします。



これで使用する準備はできました。

ドクターテーブルの操作

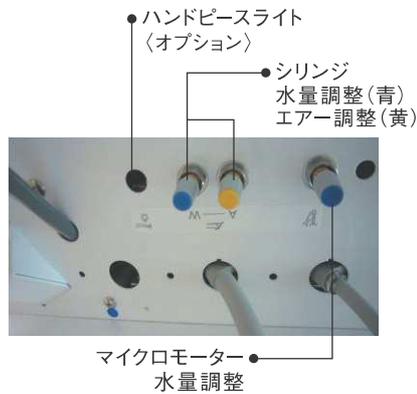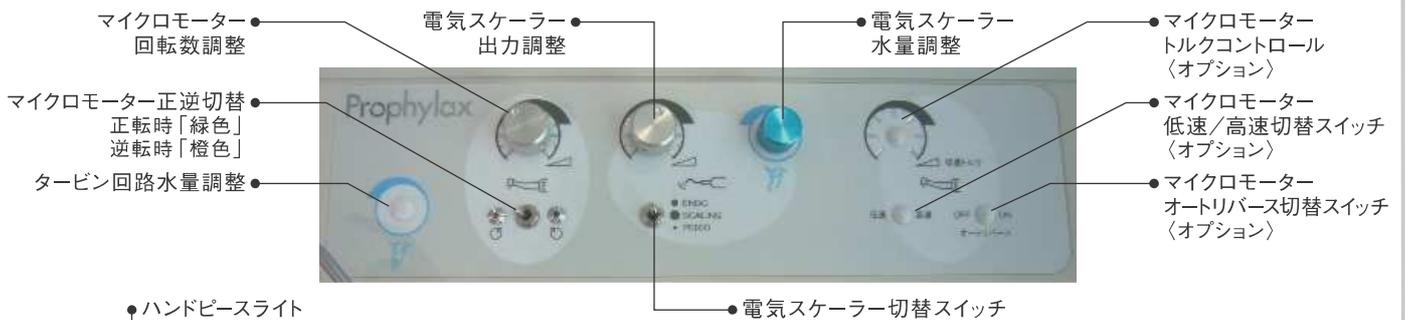

フットコントローラー



センサー式デンタルライト



チェアの操作



ヘッドレストを伸ばす際はそのまま引き上げてください。戻す際は解除ボタンを押しながら下げてください。

チェアの設定方法

1. プリセットスイッチ(①か②)でチェアを作動させます。
2. マニュアル操作スイッチでチェアを希望の位置に移動させます。
3. 設定したいプリセットスイッチ(①か②)を5秒ほど押し続け、ブザーが鳴ったらセット完了です。

メンテナンス


スピットンの清掃



※患者さん毎に、シンクに500ml以上の水を流してください。排水管内に水道水以外が流れた場合には大量の水で洗い流してください。薬液等が排水管に残ったまま放置すると、排水管が腐食し漏水を起こす危険性があります。

バキュームハンドピースの清掃

写真のように本体を分解し、溜まったゴミの洗浄を行ってください。バルブ以外はオートクレーブ滅菌が可能です。

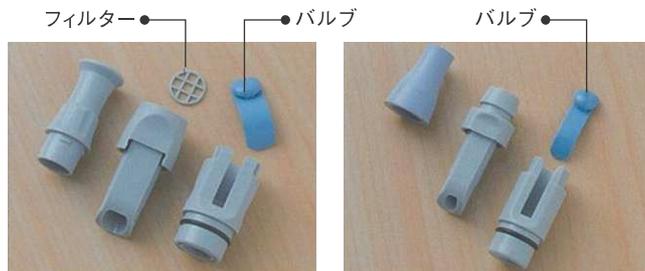

バキューム排唾ラインの洗浄



ソリッドコレクターの清掃



ソリッドコレクターを取り外す時に水がこぼれないように雑巾等で受けてください。

注) 清掃時はブラシを使わず流水で行ってください。

ハンドピースの清掃



カブリングからタービン本体を外し、上図のように専用のスプレーオイルで注油します。

※詳しくはお使いのハンドピース説明書をご覧ください。

オイルミストセパレーターの清掃



チェアレザーの清掃



修理を依頼される前に

下記をご確認ください。

ユニット、
チェアが
作動しない

- ① ユニットのメインスイッチやチェアの電源スイッチは入っていますか。
- ② エアの圧力計表示*は正常ですか。
- ③ コンプレッサーは正常に作動していますか。
- ④ ユニット用電源ブレーカーは入っていますか。

※(水0.09~0.19MPa/エア0.44~0.49MPa)

バキュームが
吸引しない

- ① バキュームモーターは正常に作動していますか。
- ② バキュームハンドピースのバルブは開いていますか。
- ③ バキュームハンドピースやソリッドコレクターのフィルターがごみ詰まりしていませんか。

タカラベルモント株式会社

東京 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 ☎(03)3405-6877 代表
大阪 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 ☎(06)6212-3602 代表

- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| ●札幌 (011) 863-2007 | ●東京 (03) 3405-6877 | ●徳島 (088) 652-1701 |
| ●盛岡 (019) 652-9744 | ●横浜 (045) 681-6241 | ●岡山 (086) 233-8825 |
| ●仙台 (022) 232-4480 | ●名古屋 (052) 932-6251 | ●広島 (082) 278-2411 |
| ●郡山 (024) 925-0742 | ●金沢 (076) 221-8412 | ●福岡 (092) 411-2746 |
| ●新潟 (025) 268-0333 | ●京都 (075) 241-3425 | ●鹿児島 (099) 226-9481 |
| ●さいたま (048) 640-5900 | ●大阪 (06) 6212-3602 | |
| ●千葉 (043) 302-0267 | ●神戸 (078) 231-6751 | |

ベルモントコミュニケーションズ(株) コールセンター(0120)194-222(ダイヤル) FAX(072)344-7985
[ホームページアドレス] <http://www.takara-dental.jp>