

ご使用前に……



①テーブル下部にある水の元バルブをOPENにします。

●元バルブ



②テーブル裏面にあるメインスイッチのレバーをONにします。

●メインスイッチ

これで使用する準備はできました。

ドクターテーブルの操作



電気スケーラースプレー水量調整

●エア回路スプレー水量調整

電気スケーラー
出力調整<オプション>


電気スケーラー
切替スイッチ
<オプション>

マイクロモーター回転数上限調整

マイクロモーター正逆切替え<オプション>
正転時…「緑色」
逆転時…「橙色」

MAIN

R

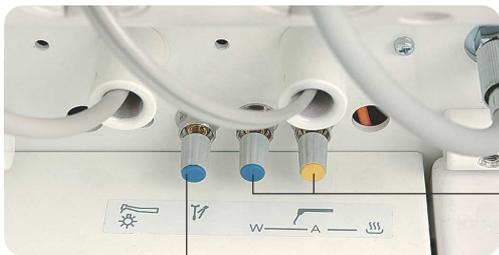

シリンジ
水量調整(青)
エア調整(黄)

●ハンドピースエア調整

フットコントローラー



●ハンドピース
水スプレー
切替え

●チップブロー

●ドライブペダル

チェア及びライトの操作



チェアオート操作
チェアマニュアル操作

●チェア回転
固定/解除レバー



●チェアプリセット
●チェアマニュアル操作

●チェア
プリセット

●うがい
ポジション

●オートリターン

センサー式デンタルライト オプション



●照度切替
スイッチ

●センサー
手を近づけると点灯、
消灯します。

メンテナンス

スピットンの清掃



●水栓金具

●シンク

●ガラス


シンク部は中性洗剤を浸したスポンジ等で汚れを落としてください。

注) 熱湯、研磨剤は使用しないでください。

※患者さん毎に、シンクに500 ml以上の水を流してください。排水管内に水道水以外が流れた場合には大量の水で洗い流してください。薬液等が排水管内に残ったまま放置すると、排水管が腐食し漏水を起こす危険性があります。

バキュームハンドピースの清掃

写真のように本体を分解し、溜まったゴミの洗浄を行ってください。バルブ以外はオートクレーブ滅菌が可能です。

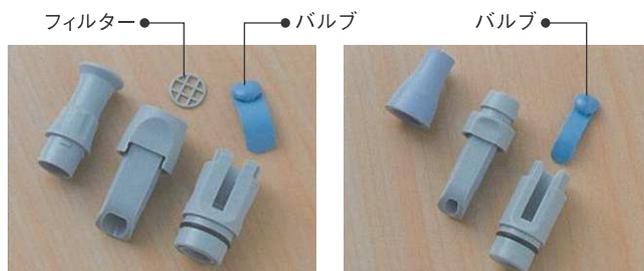

バキューム排唾ラインの洗浄



タカラベルモントのユニット専用洗浄液オロトルプラスを使用し、バキュームHPと排唾管を挿し込み吸引させます。

※詳しくはオロトルプラスの説明書をご覧ください。

オイルミストセパレーターの清掃



ハンドピース内に含まれるオイルがこの容器内のスポンジに溜まりますので、1ヶ月に1回は洗浄してください。

●オイルミストセパレーター

※容器を時計回りに回すとゆるみます。

チェアレザーの清掃



当社推奨のデュール製除菌・洗浄液を使用し、レザー表面を柔らかい布で清掃してください。

注) 溶剤や研磨剤、シンナーを含んだ洗剤は使用しないでください。

修理を依頼される前に

下記をご確認ください。

ユニット、
チェアが
作動しない

- ① ユニットのメインスイッチやチェアの電源スイッチは入っていますか。
- ② エアの圧力計表示*は正常ですか。
- ③ コンプレッサーは正常に作動していますか。
- ④ ユニット用電源ブレーカーは入っていますか。

※(水0.09~0.19MPa/エア0.44~0.49MPa)

バキュームが
吸引しない

- ① バキュームモーターは正常に作動していますか。
- ② バキュームハンドピースのバルブは開いていますか。
- ③ バキュームハンドピースやソリッドコレクターのフィルターがごみ詰まりしていませんか。

タカラベルモント株式会社

東京 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 ☎(03)3405-6877 代表
大阪 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 ☎(06)6212-3602 代表

●札幌 (011) 863-2007	●東京 (03) 3405-6877	●徳島 (088) 652-1701
●盛岡 (019) 652-9744	●横浜 (045) 681-6241	●岡山 (086) 233-8825
●仙台 (022) 232-4480	●名古屋 (052) 932-6251	●広島 (082) 278-2411
●郡山 (024) 925-0742	●金沢 (076) 221-8412	●福岡 (092) 411-2746
●新潟 (025) 268-0333	●京都 (075) 241-3425	●鹿児島 (099) 226-9481
●さいたま (048) 640-5900	●大阪 (06) 6212-3602	
●千葉 (043) 302-0267	●神戸 (078) 231-6751	

ベルモントコミュニケーションズ(株) コールセンター(0120)194-222(ダイヤル) FAX(072)344-7985
[ホームページアドレス] <http://www.takara-dental.jp>