


Rapport

ラポール


OPERATING GUIDE

ドクターテーブルの機能

テーブル底面

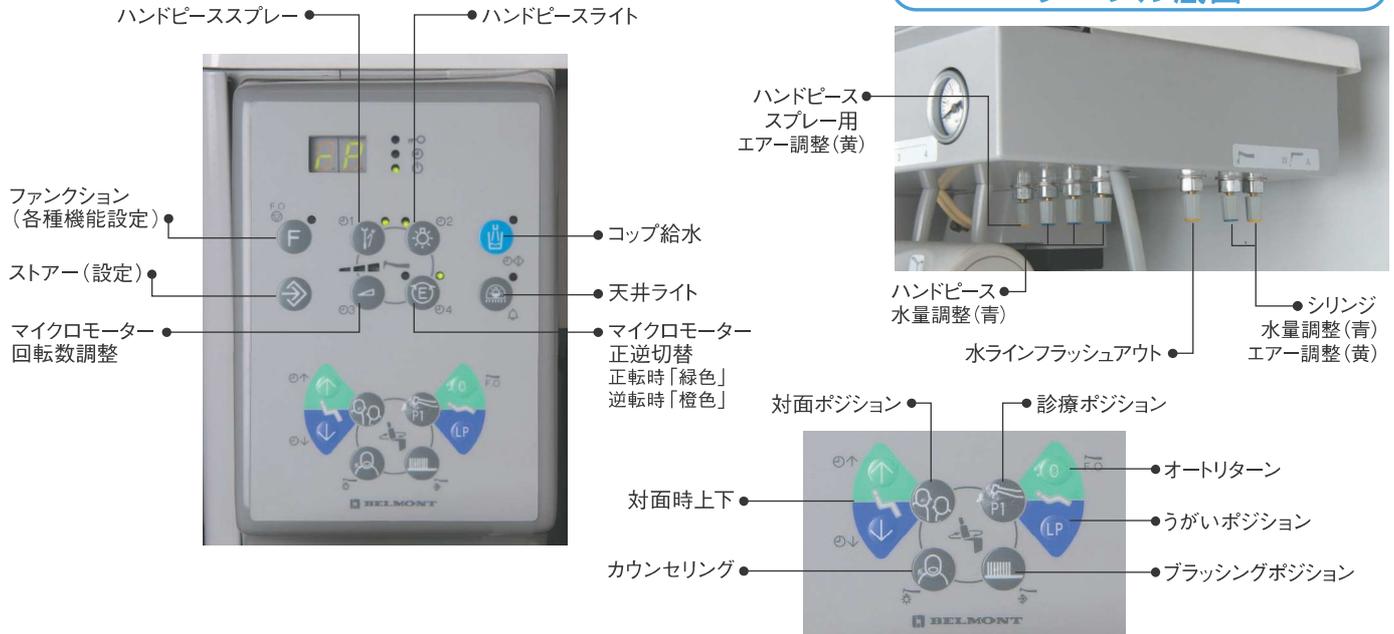

アシスタント機能

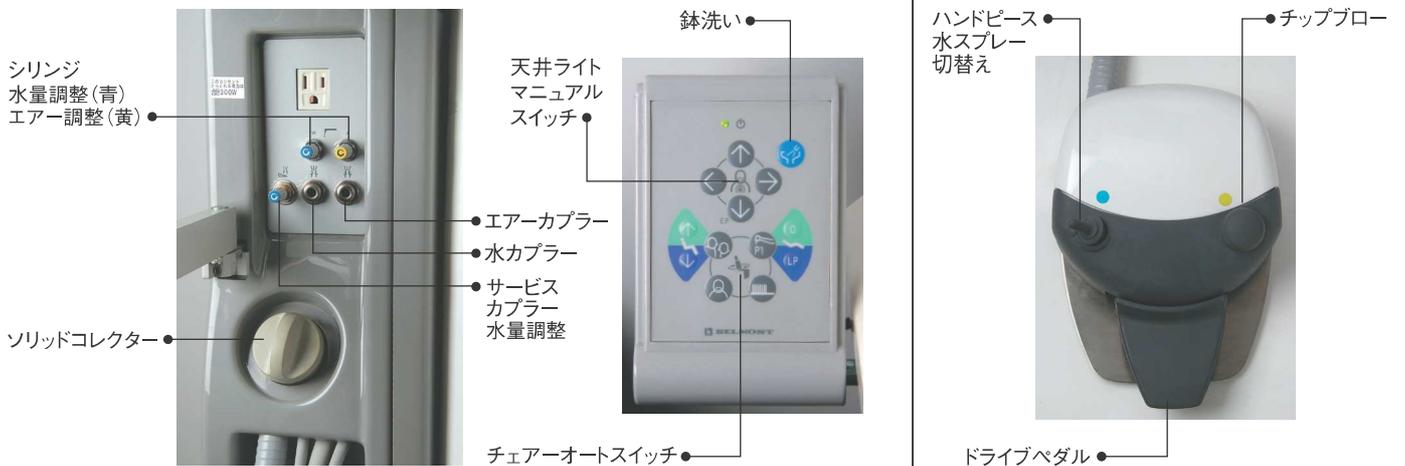

チェア

チェアの設定方法

診療ポジションから、マニュアルで希望の位置にチェアを移動させ、スタースイッチを押した後、診療ポジションのスイッチ(P1)を押せば設定完了です。



メンテナンス

スピットンの清掃



●排水キャップ ●排水フィルター

排水キャップ、排水フィルターを取り外し、中性洗剤を浸したスポンジ等で汚れを落としてください。

注) 酸やアルカリ性の洗浄剤を使用すると、金属などを腐食させるおそれがありますので使用しないでください。

バキュームハンドピースの清掃



●フィルター
●バルブ



●バルブ

写真のように本体を分解し、溜まったゴミの洗浄を行ってください。バルブ以外はオートクレープ滅菌が可能です。

ソリッドコレクターの清掃



●ソリッドコレクター



ソリッドコレクターを取り外す時に水がこぼれないように雑巾等で受けてください。

ハンドピースの清掃



カプリングからタービン本体を外し、専用のスプレーオイルで注油します。

※詳しくはお使いのハンドピース説明書をご覧ください。

バキューム排唾ラインの洗浄



タカラベルモントのユニット専用洗浄液オロトルプラスを使用し、バキュームHPと排唾管を挿し込み吸引させます。

※詳しくはオロトルプラスの説明書をご覧ください。

オイルミストセパレーター清掃



ハンドピース内に含まれるオイルがこの容器内のスポンジに溜まりますので、1ヶ月に1回は洗浄してください。

チェアレザーの清掃



当社推奨のデュール製除菌・洗浄液を使用し、レザー表面を柔らかい布で清掃してください。

注) 溶剤や研磨剤、シンナーを含んだ洗剤は使用しないでください。

修理を依頼される前に

下記をご確認ください。

ユニット、
チェアが
作動しない

- ①ユニットのメインスイッチやチェアの電源スイッチは入っていますか。
- ②エアーの圧力計表示※は正常ですか。
- ③コンプレッサーは正常に作動していますか。
- ④ユニット用電源ブレーカーは入っていますか。

※(水0.09~0.19MPa/エアー0.44~0.49MPa)

バキュームが
吸引しない

- ①バキュームモーターは正常に作動していますか。
- ②バキュームハンドピースのバルブは開いていますか。
- ③バキュームハンドピースやソリッドコレクターのフィルターがごみ詰まりしていませんか。

タカラベルモント株式会社

東京 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 ☎(03)3405-6877 代表
大阪 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 ☎(06)6212-3602 代表

●札幌 (011) 863-2007 ●東京 (03) 3405-6877 ●徳島 (088) 652-1701
●盛岡 (019) 652-9744 ●横浜 (045) 681-6241 ●岡山 (086) 233-8825
●仙台 (022) 232-4480 ●名古屋 (052) 932-6251 ●広島 (082) 278-2411
●郡山 (024) 925-0742 ●金沢 (076) 221-8412 ●福岡 (092) 411-2746
●新潟 (025) 268-0333 ●京都 (075) 241-3425 ●鹿児島 (099) 226-9481
●さいたま (048) 640-5900 ●大阪 (06) 6212-3602
●千葉 (043) 302-0267 ●神戸 (078) 231-6751

ベルモントコミュニケーションズ(株) コールセンター(0120)194-222(ダイヤル) FAX(072)344-7985
[ホームページアドレス] <http://www.takara-dental.jp>