


ドクターテーブルの機能

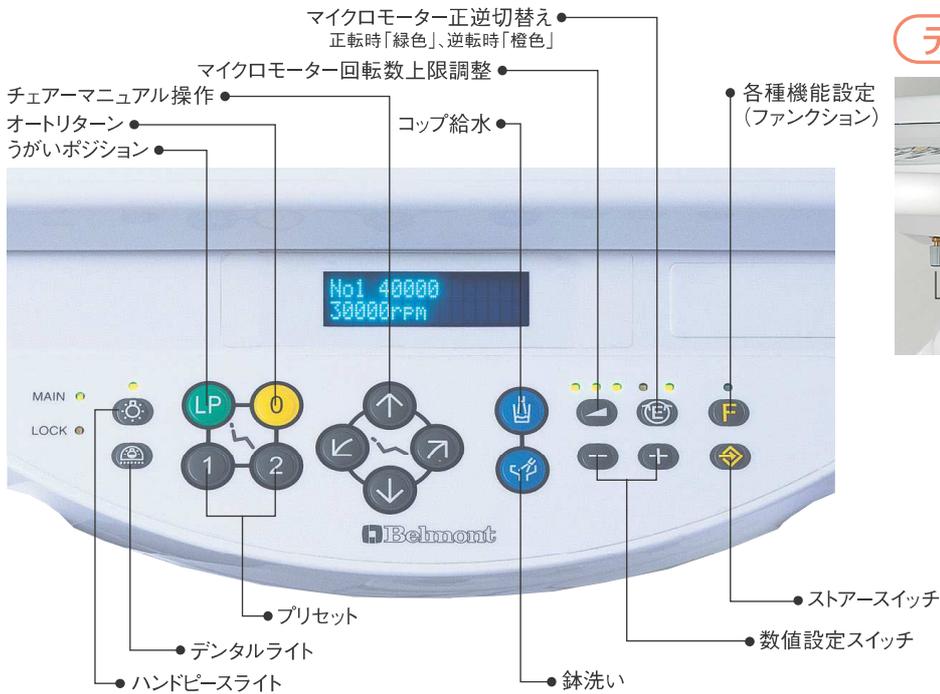

テーブル底面




● ハンドピース水量調整 (青)

シリンジ ●
水量調整 (青)
エア調整 (黄)

● メインスイッチ

アシスタント機能

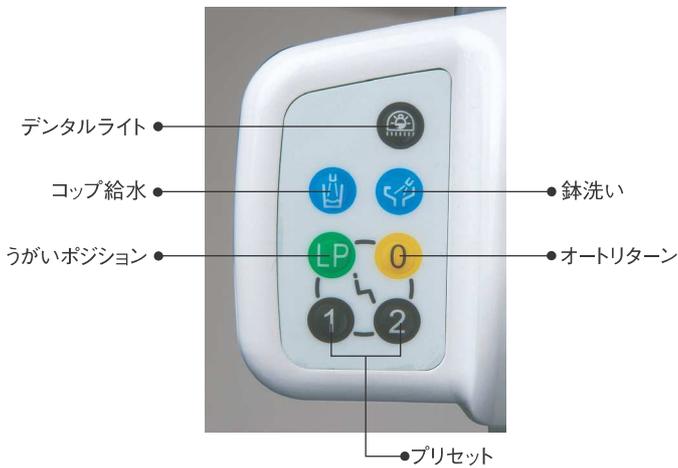

フットコントローラー



チェアの設定方法

1. マニュアル操作でチェアを希望の位置に移動させます。
2. ストアスイッチを押し、設定したいプリセットスイッチ (①か②) を5秒ほど押し続け、ブザーが鳴ったらセット完了です。

センサー式デンタルライト



メンテナンス


スピットンの清掃



排水キャップ、排水フィルターを取り外し、中性洗剤を浸したスポンジ等で汚れを落としてください。

注) 酸やアルカリ性の洗浄剤を使用すると、金属などを腐食させるおそれがありますので使用しないでください。またボウル着脱の際には、必ず事前にメインスイッチをお切りください。

バキュームハンドピースの清掃

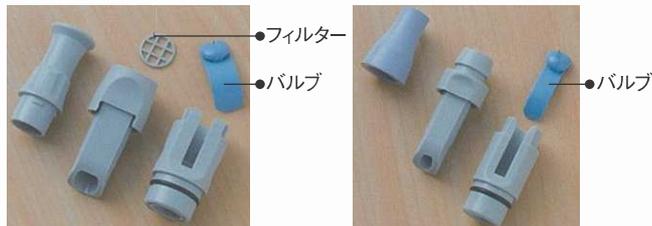

写真のように本体を分解し、溜まったゴミの洗浄を行ってください。バルブ以外はオートクレーブ滅菌が可能です。

バキューム排唾ラインの洗浄



タカラベルモントのユニット専用洗浄液オロトルプラスを使用し、バキュームHPと排唾管を挿し込み吸引させます。

※詳しくはオロトルプラスの説明書をご覧ください。

ソリッドコレクターの清掃



ソリッドコレクターを取り外す時に水がこぼれないように雑巾等で受けてください。

注) 清掃時はブラシを使わず流水で行ってください。

ハンドピースの清掃



カプリングからタービン本体を外し、上図のように専用のスプレーオイルを注油します。

※詳しくはお使いのハンドピース説明書をご覧ください。

オイルミストセパレーター



ハンドピース内に含まれるオイルがこの容器内のスポンジに溜まりますので、1ヶ月に1回は洗浄してください。

●オイルミストセパレーター
※容器を時計回りに回すとゆるみます。

チェアレザーの清掃



当社推奨のデュール製除菌・洗浄液を使用し、レザー表面を柔らかい布で清掃してください。

注) 溶剤や研磨剤、シンナーを含んだ洗剤は使用しないでください。

修理を依頼される前に

下記をご確認ください。

ユニット、
チェアが
作動しない

- ① ユニットのメインスイッチやチェアの電源スイッチは入っていますか。
- ② エアの圧力計表示※は正常ですか。
- ③ コンプレッサーは正常に作動していますか。
- ④ ユニット用電源ブレーカーは入っていますか。

※(水0.09~0.19MPa/エア0.44~0.49MPa)

バキュームが
吸引しない

- ① バキュームモーターは正常に作動していますか。
- ② バキュームハンドピースのバルブは開いていますか。
- ③ バキュームハンドピースやソリッドコレクターのフィルターがごみ詰まりしていませんか。

タカラベルモント株式会社

東京 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 ☎(03)3405-6877 代表
大阪 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 ☎(06)6212-3602 代表

- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| ●札幌 (011) 863-2007 | ●東京 (03) 3405-6877 | ●徳島 (088) 652-1701 |
| ●盛岡 (019) 652-9744 | ●横浜 (045) 681-6241 | ●岡山 (086) 233-8825 |
| ●仙台 (022) 232-4480 | ●名古屋 (052) 932-6251 | ●広島 (082) 278-2411 |
| ●郡山 (024) 925-0742 | ●金沢 (076) 221-8412 | ●福岡 (092) 411-2746 |
| ●新潟 (025) 268-0333 | ●京都 (075) 241-3425 | ●鹿児島 (099) 226-9481 |
| ●さいたま (048) 640-5900 | ●大阪 (06) 6212-3602 | |
| ●千葉 (043) 302-0267 | ●神戸 (078) 231-6751 | |

ベルモントコミュニケーションズ(株) コールセンター(0120)194-222(ダイヤル) FAX(072)344-7985
[ホームページアドレス] <http://www.takara-dental.jp>