

# BELPORT II

ベルポート II

OPERATING GUIDE

## ご使用前に……

①チェア一足元のカバー内にある元バルブを開きます。



元バルブ

デンタルライト  
センサーマニュアル  
切替えスイッチ

②チェアスイッチ（緑色）を入れてください。



チェアスイッチ

③ドクターテーブル底面にあるメインスイッチを入れてください。



メインスイッチ


これで使用する準備はできました。

## ドクターテーブルの操作

チェアマニュアル操作


うがいポジション

プリセット

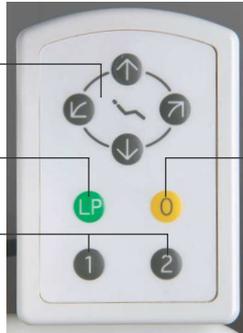

オートリターン


ハンドピース  
水量調整

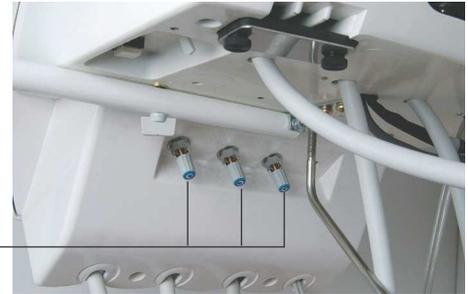

## アシスタント機能

ソリッドコレクター

シリンジ  
エア調整(黄)  
水量調整(青)

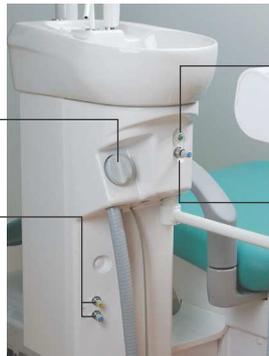

インジケーター  
メインスイッチを入れると  
緑色に点灯します。

鉢洗い水量調整

## チェアの設定方法

1. 設定したいプリセットスイッチ(①か②)かLPを押してチェアを移動させます。
2. マニュアル操作でチェアを希望の位置に移動させます。
3. 再び1.で押したスイッチを5秒ほど押し続け、ブザーが鳴ったらセット完了です。

## フットコントローラー



ハンドピース  
水スプレー  
切替え

チップブロー

ドライブペダル

## デンタルライト



照度調節スイッチ

## センサー式<オプション>



照度切替  
スイッチ

センサー  
手を近づけると点灯、  
消灯します。

# メンテナンス


## スピットンの清掃



排水キャップ、排水フィルターを取り外し、中性洗剤を浸したスポンジ等で汚れを落としてください。

注) 酸やアルカリ性の洗浄剤を使用すると、金属などを腐食させるおそれがありますので使用しないでください。

## バキュームハンドピースの清掃

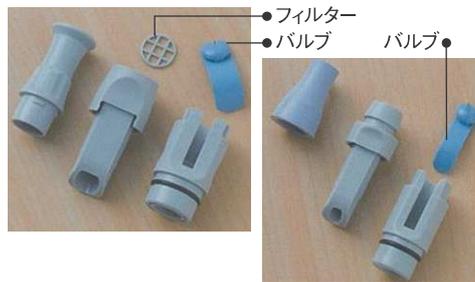

写真のように本体を分解し、溜まったゴミの洗浄を行ってください。バルブ以外はオートクレーブ滅菌が可能です。

## バキューム排唾ラインの洗浄



タカラベルモントのユニット専用洗浄液オロトルプラスを使用し、バキュームHPと排唾管を挿し込み吸引させます。

※詳しくはオロトルプラスの説明書をご覧ください。

## オイルミストセパレーターの清掃



ハンドピース内に含まれるオイルがこの容器内のスポンジに溜まりますので、1ヶ月に1回は洗浄してください。

## チェアレザーの清掃



当社推奨のデュール製除菌・洗浄液を使用し、レザー表面を柔らかい布で清掃してください。

注) 溶剤や研磨剤、シンナーを含んだ洗剤は使用しないでください。

修理を依頼される前に  
下記をご確認ください。

ユニット、  
チェアが  
作動しない

- ① ユニットのメインスイッチやチェアの電源スイッチは入っていますか。
- ② エアの圧力計表示※は正常ですか。
- ③ コンプレッサーは正常に作動していますか。
- ④ ユニット用電源ブレーカーは入っていますか。

※(水0.09~0.19MPa/エア-0.44~0.49MPa)

バキュームが  
吸引しない

- ① バキュームモーターは正常に作動していますか。
- ② バキュームハンドピースのバルブは開いていますか。
- ③ バキュームハンドピースやソリッドコレクターのフィルターがごみ詰まりしていませんか。

## タカラベルモント株式会社

東京 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 ☎(03)3405-6877 代表  
大阪 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 ☎(06)6212-3602 代表

●札幌 (011) 863-2007	●東京 (03) 3405-6877	●徳島 (088) 652-1701
●盛岡 (019) 652-9744	●横浜 (045) 681-6241	●岡山 (086) 233-8825
●仙台 (022) 232-4480	●名古屋 (052) 932-6251	●広島 (082) 278-2411
●郡山 (024) 925-0742	●金沢 (076) 221-8412	●福岡 (092) 411-2746
●新潟 (025) 268-0333	●京都 (075) 241-3425	●鹿児島 (099) 226-9481
●さいたま (048) 640-5900	●大阪 (06) 6212-3602	
●千葉 (043) 302-0267	●神戸 (078) 231-6751	

ベルモントコミュニケーションズ(株) コールセンター(0120)194-222(多言語) FAX(072)344-7985  
[ホームページアドレス] <http://www.takara-dental.jp>