


ご使用の前に

① アシスタント部の下部にある水の元バルブをOPENにします。

バルブが閉じた状態

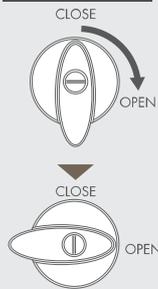

バルブが開いた状態



元バルブ

② アシスタント部の上部にあるメインスイッチを入れてください。




メインスイッチ

③ ハンドピースの水ラインやコップ給水に滞留している水を排出します。



※キャンセルする場合は[F]ファンクションスイッチを押します。

ドクターテーブルの操作

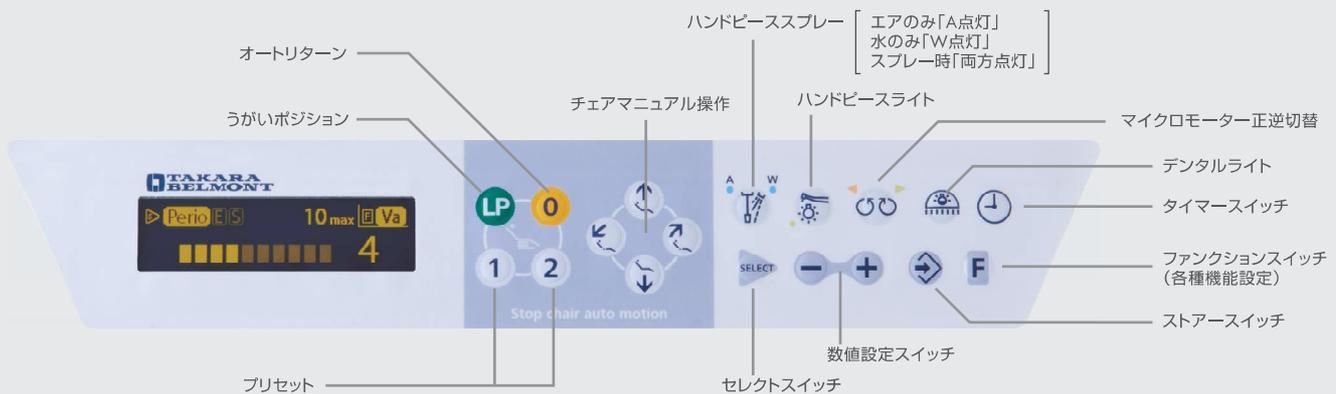

テーブル側面・底面



チェアの設定方法

- ① マニュアル操作でチェアを希望の位置に移動させます。
- ② 設定したいプリセットスイッチ(「1」か「2」)を5秒ほど押し続け、ブザーが鳴ったらセット完了です。

センサー式デンタルライト



アシスタント機能





スピットンの清掃



排水キャップ



排水フィルター

排水キャップ、排水フィルターを取り外し、中性洗剤を浸したスポンジなどで汚れを落としてください。

注) 酸性やアルカリ性の洗浄剤を使用すると、金属などを腐食させる恐れがありますので使用しないでください。

ソリッドコネクターの清掃



ソリッドコネクターを取り外す時に水がこぼれないように雑巾などで受けてください。


正しい向き

ツマミのふくらみが上



正しくない向き

ツマミのふくらみが上以外の位置

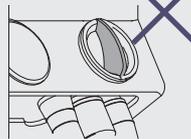

ハンドピースの清掃



カップリングからタービン本体を外し、上図のように専用のスプレーオイルを注油します。

より確実なお手入れを行っていたために、Care3プラスなど、自動洗浄注油装置を推奨します。

※詳しくはお使いのハンドピース説明書をご覧ください。

バキュームハンドピースの清掃



写真のように本体を分解し、清掃を行ってください。オートクレーブ滅菌が可能です。

バキューム排唾ラインの洗浄



タカラベルモントのユニット専用洗浄液オロトルプラスを使用し、バキュームHPと排唾管を挿し込み吸引させます。

※詳しくはオロトルプラスの説明書をご覧ください。

オイルミストセパレーター清掃



ハンドピース内に含まれるオイルがこの容器内のスポンジに溜まりますので、赤いラインを超えないように1ヶ月に1回は洗浄してください。

チェアレザーの清掃



当社推奨のデュール製除菌・洗浄液を使用し、レザー表面を柔らかい布で清掃してください。



修理を依頼される前にご確認ください

ユニット、
チェアが
作動しない

- ①ユニットのメインスイッチやチェアの電源スイッチは入っていますか。
 - ②エアーの圧力計表示*は正常ですか。
 - ③コンプレッサーは正常に作動していますか。
 - ④ユニット用電源ブレーカーは入っていますか。
- *水0.09~0.19Mpa/エアー0.44~0.49Mpa

バキュームが
吸引しない

- ①バキュームモーターは正常に作動していますか。
- ②バキュームハンドピースのバルブは開いていますか。
- ③バキュームハンドピースやソリッドコネクターのフィルターがゴミ詰まりしていませんか。

タカラベルモント株式会社

◆ホームページアドレス <http://www.takara-dental.jp>

本社 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL.(06)6212-3602
〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 TEL.(03)3405-6877

札幌(011)863-2007 盛岡(019)652-9744 仙台(022)232-4480 郡山(024)925-0742
新潟(025)268-0333 さいたま(048)640-5900 千葉(043)302-0267 東京(03)3405-6877
横浜(045)681-6241 名古屋(052)932-6251 金沢(076)221-8412 京都(075)241-3425
大阪(06)6212-3602 神戸(078)231-6751 岡山(086)233-8825 広島(082)278-2411
徳島(088)652-1701 福岡(092)411-2746 鹿児島(099)226-9481

総合サービスセンター
(修理および点検受付窓口)

ベルモントコミュニケーションズ(株) コールセンター

TEL(0120)194-222 (フリーダイヤル) FAX(072)344-7985